
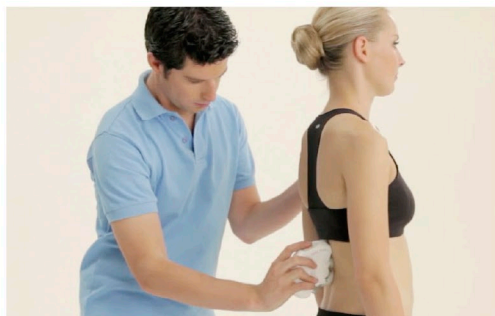


# Therapieerfolge sichtbar machen

Wirbelsäulen-Analyse, strahlenfrei und kostengünstig

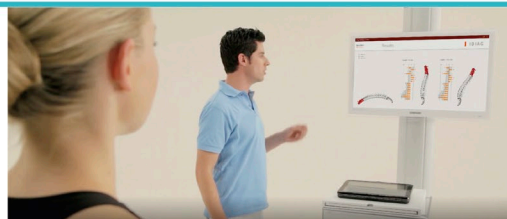

Nach verschiedenen technischen und Design-Anpassungen wartet die Idiag M360 mit neuer Nutzerführung, neuen Darstellungen und Auswertemöglichkeiten auf. Die Analyse kann über GOÄ oder als IGeL Leistung berechnet werden.

**Informationen oder eine unverbindliche Vorführung bei Ihnen vor Ort bietet die Firma Idiag GmbH**  
[www.idiag.de](http://www.idiag.de)

Die Daten helfen im Gespräch mit dem Patienten, um eine Behandlungs-Strategie festzulegen. Wiederholte Messungen dokumentieren die Behandlungserfolge.

Die Ermittlung der geometrischen Daten der Wirbelsäule mittels Idiag M360 ermöglicht eine umfassende Wirbelsäulenanalyse, strahlenfrei und kostengünstig.

Die Bewegungs- und Haltungskompetenz im Rumpf- und Beckenbereich sind entscheidende Größen. Bei gutem Zustand ermöglichen sie unseren Sportlern effiziente und schmerzfreie Bewegungsabläufe – eine Voraussetzung für den Erfolg. Was ist los, wenn unser Schützling nun plötzlich über Rückenschmerzen klagt? Wie untersuche ich den Zustand, dokumentiere Veränderungen und visualisiere dies meinem Patienten?

Das Rückenanalysesystem Idiag M360 wird von Hand über die Wirbelsäule geführt. Das Gerät sendet die geometrischen Daten an Ihren PC. Die Software stellt die gemessene Wirbelsäule in einfach verständlichen Bildern und Graphiken dar und vergleicht sie zu einem Datenpool von asymptomatischen Probanden. Im Handumdrehen erhalten Sie eine fundierte Analyse der Haltung, Beweglichkeit und der Haltungskompetenz. So können funktionelle und strukturelle Veränderungen der Wirbelsäule und deren muskuloskelettalen Systems erfasst werden. Die Analyse ermöglicht eine gezielte Behandlung von Funktionseinschränkungen wie z. B. Blockierungen, Instabilitäten, Kompensationsbewegungen etc. sowie die Überwachung des Therapieverlaufs.

Über 3000 Ärzte, Therapeuten und Fachspezialisten für Bewegung und Gesundheit nutzen bereits dieses Verfahren, welches ursprünglich unter der Marke MediMouse® entwickelt wurde.

# IDIAG M360

Strahlenfreie Untersuchung  
der Wirbelsäule

Wir machen  
Therapieerfolge  
sichtbar.



### Gezielte Behandlung

durch die einfache und schnelle Analyse  
von Form, Stabilität und Mobilität

### Veränderungen visualisieren

Erkennen von funktionellen und  
strukturellen Veränderungen

### Optimieren des Therapieerfolges

durch Transparenz für Patienten  
und Therapeuten